

9841228725

SARS-CoV-2 एन्टिजेन हुट परीक्षण
(स्वयम्-परीक्षण)
प्रयोग गर्ने निर्देशन

Flowflex™


REF L031-118M5	REF L031-118N5	REF L031-118W5	नेपाली
REF L031-118P5	REF L031-118Z5	REF L031-118R5	

उक्त नाकको खाल स्वाबका नमूनाहरूमा SARS-CoV-2 न्युक्लियोक्याप्सिड एन्टिजेनहरू पढा लगाउनका लागि गरिने हुट परीक्षण ।


इन मिट्रो निदानात्मक प्रयोगका लागि मात्र । स्वयम्-परीक्षणका लागि । परीक्षण गर्नुअघि निर्देशनहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् ।

तयारी


आफ्ना हातहरू धुनुहोस् वा सेनिटाइज गर्नुहोस् । परीक्षण सुरु गर्नुअघि तिनीहरू सुक्का धनु भनी सुनिश्चित गर्नुहोस् ।

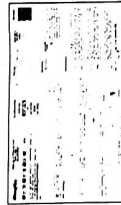

SARS-CoV-2 एन्टिजेन हुट परीक्षण किट प्रयोग गर्नुअघि निर्देशनहरू पढ्नुहोस् ।

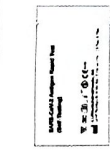

व्यासेटको फोइल धौलोमा क्षपिपेटको म्याद समाप्त मिति जाँच गर्नुहोस् ।

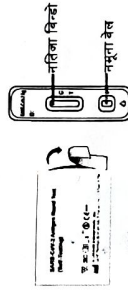

धैरी सोल्नुहोस् । क्यासेटमा नतिजा विन्डो र नमूना वेल जाँच गर्नुहोस् ।

प्रदान गरिएका सामग्रीहरू	परिमाण (पिस)					
	1T	2T	3T	5T	20T	25T
परीक्षणको क्यासेट	1	2	3	5	20	25
एक्सट्र्याक्सन बफर ट्युब	1	2	3	5	20	25
उपयोग गरेर फाल्ने ल्याक स्वाब	1	2	3	5	20	25
फोहोर फाल्ने भोला ट्युब होल्डर	1	2	3	5	20	25
प्रयोग गर्ने निर्देशन	1	1	1	1	1	1

नमूना सङ्कलन



स्वयम् सङ्कलन



व्यक्त स्याहारकर्ताका सङ्कलन

नाकको खाल स्वाबको नमूना १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूले स्वयम् सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई उमाबुवा वा कावुनी अभिभावकले नाकको खाल स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्छ । कृपया बालबालिकाले गर्ने नमूना सङ्कलनका लागि आफ्ना स्थानीय मानदर्शनहरूको पालना गर्नुहोस् ।

आवश्यक भाएका तर प्रदान नगरिएका सामग्रीहरू ट्युब होल्डर



नतिजा अनुवादन

एक्सट्र्याक्सन बफर ट्युबको शीर्षबाट उल्टिनियम फोइल हटाउनुहोस् ।

किट बाकसको खालमा ट्युब घुसाउनुहोस् । (वा ट्युबलाई ट्युब होल्डरमा राख्नुहोस् ।)

स्वाबलाई नाकको खालमा सफा गर्दै ५ पटक घुसाउनुहोस् । स्वाब निकाल्नुहोस् र थपस्वाबलाई उक्त नाकको खालमा घुसाउनुहोस् । चरण ४ दोहोर्‍याउनुहोस् ।

स्वाबलाई विस्तारै एक्सट्र्याक्सन बफर ट्युबमा जोड्नुहोस् । ट्युबको तल्लो भागमा घुमाएर वा फिलप गरेर राम्रोसँग मिसाउनुहोस् ।

ट्युबलाई दबाउँदै स्वाब निकाल्नुहोस् ।

एकदमै छेउबाट स्वाब प्याकेजिङ सोल्नुहोस् । सावधानी: स्वाबको सोस्ने ट्युबलाई आफ्ना हातहरूले नछुनुहोस् ।

ट्युबको छेउको भाग दबाउँदै स्वाबलाई ५ पटक घुमाउनुहोस् ।

स्वाबलाई ३० सेकेन्डसम्म ट्युब र स्विर्लमा घुसाउनुहोस् ।

ट्युबलाई विस्तारै दबाउनुहोस् र मिश्रणको ४ थोपा नमूना वेल्मा हाल्नुहोस् ।

नेगेटिभ नतिजा आइमा:



वियन्जन रेखा (C) र परीक्षण रेखा (T) मात्र देखापर्छ । यसको अर्थ कुनै SARS-CoV-2 एन्टिजेन पत्ता लागेको छैन । सेन्स डेटेक्ट किटबाट नेगेटिभ नतिजा आएका तथा लक्षण पनि नभएको बच्चाहरू परीक्षण गर्नु पर्छ । नेगेटिभ नतिजा आएको तर कोभिड-१९ रोग निदानका लागि नाकको खालबाट प्राप्त स्वाबस्य संस्थाबाट एन्टिजेन उपचार PCR विधिबाट पुनः परीक्षणको नतिजा नजान्नेसम्म पोजिटिभ सरह नै आइसोलेसनमा राख्नु पर्छ ।

पोजिटिभ नतिजा आइमा:



दुई वियन्जन रेखा (C) र परीक्षण रेखा (T) देखापर्छ । यसको अर्थ कुनै SARS-CoV-2 एन्टिजेन पत्ता लागेको छ । नोट: परीक्षण रेखाको धेरै (T) मा भएको कुनै पनि मधुरो रेखालाई पोजिटिभ मान्नुपर्छ । नतिजा पोजिटिभ आएमा रोगको पुष्टीका लागि नाकको खालबाट प्राप्त स्वाबस्य संस्थाबाट एन्टिजेन उपचार PCR विधिबाट पुनः परीक्षण गरी नतिजा पुष्ठीकरण गराउनु पर्छ । पुनः परीक्षण गर्नु स्वस्थ संस्थाले परीक्षणको नतिजा तोकिएको विधिबाट इभिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जातकारी गराउनु पर्छ । पुनः परीक्षण गराउन सक्ने भन्पमा प्रयोगकर्ताले पोजिटिभ सरह नै आइसोलेसनमा राख्नु पर्छ र सोको जातकारी सम्बन्धित पारिषादको स्वास्थ्य शाखामा गराउनु पर्छ ।

इन्ध्यालिड नतिजा आइमा:



वियन्जन रेखा (C) देखापर्दैन । तरांग प्यालिभ मात्रमा नहुने वा गलत तरिकाले सञ्चालन गर्नु अमान्य नतिजाका सम्भावित कारणहरू हुन् । इन्ध्यालिड नतिजा आएमा उक्त किट प्रयोग गरी पुनः परीक्षण गर्नु सकिने छ वा स्वास्थ्य संस्थामा गई अन्य विधिबाट एन्टिजेन डेटेक्ट वा पिसिआर डेटेक्ट । परीक्षण गर्नु सकिने छ ।

आफ्नो परीक्षण किट सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुहोस् ।

तयारीको परीक्षण पूरा भइसकेपछि, प्रयोग गरिएका सबै किटका सामग्रीहरू प्रदान गरिएको फोहोर फाल्ने भोलामा हाल्नुहोस् । र तोकिएको जीपलगायत ब्यागमा राखेर तोकिएका सुरक्षित ठाउँमा फाल्नुहोस् ।